


WIE SIE EINEM BETROFFENEN MIT PLÖTZLICHEM HERZ-KREISLAUFSTILLSTAND HELFEN KÖNNEN

Ein plötzlicher Herz-Kreislaufstillstand kann jederzeit und überall auftreten. Dabei hört das Herz plötzlich auf richtig zu schlagen. Das Opfer hat die besten Überlebenschancen, wenn sofort mit der Wiederbelebung begonnen und ein automatisierter externer Defibrillator (AED) verwendet wird.

Keine Panik. Sie können helfen.

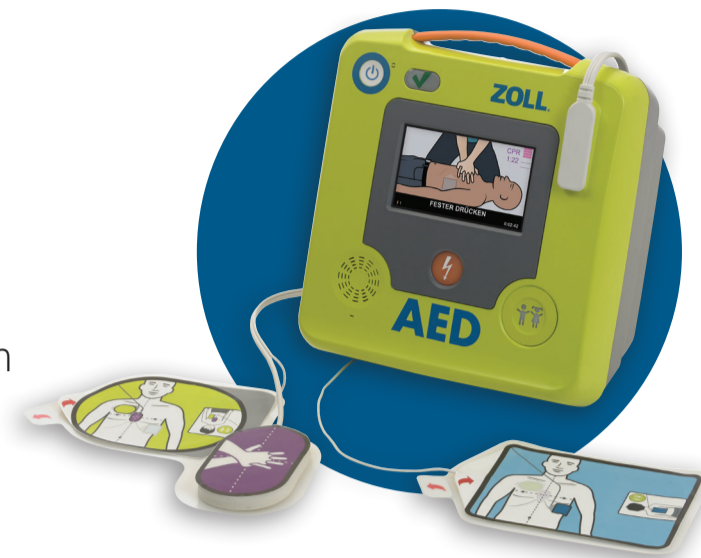

WIE SIE HELFEN KÖNNEN

Lebensrettende Wiederbelebung - AHA Leitlinien 2015

Überprüfen, ob Gefahr besteht

Bewusstsein prüfen

Hilfe rufen,
Notruf 144 wählen

Atmung prüfen

Mit der Wiederbelebung
beginnen

Defibrillator (AED) so schnell wie
möglich anbringen und den
Anweisungen folgen

WIE ZOLL HELFEN KANN


ZOLL AED 3® mit Real CPR Help®




Bewusstsein prüfen
"Geht es Ihnen gut?"




Hilfe rufen,
Notruf 144 wählen

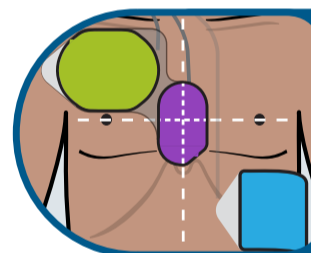


"Defi-Elektroden auf entblösste
Patientenbrust kleben"

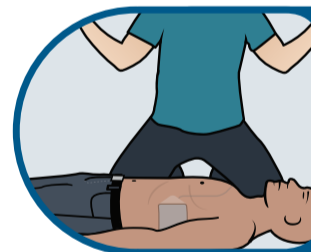

"Patient nicht berühren -
Analyse läuft"

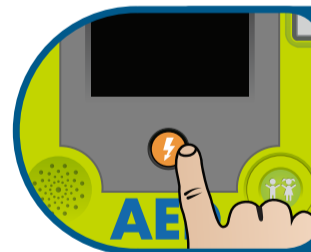

Falls Schock erforderlich:
"Blinkende Schocktaste drücken"

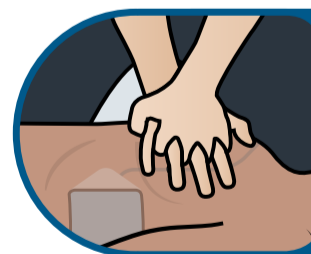

Falls kein Schock empfohlen
wird oder nachdem der Schock
abgegeben wurde, "mit
Wiederbelebung beginnen"



Nicht alle AEDs sind gleich. ZOLL AEDs bieten Unterstützung beim gesamten Wiederbelebungsprozess mit Anleitung in Echtzeit und Feedback zur Kompressionsfrequenz und -tiefe. Mit dieser Unterstützung können Helfer die bestmögliche Wiederbelebung leisten, um die Überlebenschancen des Betroffenen zu verbessern.